


ABSO SATIN –VUODESUOJA SATIINILIUKUOSALLA JA KAHVOILLA

TARKISTA TUOTTEEN TURVALLISUUS

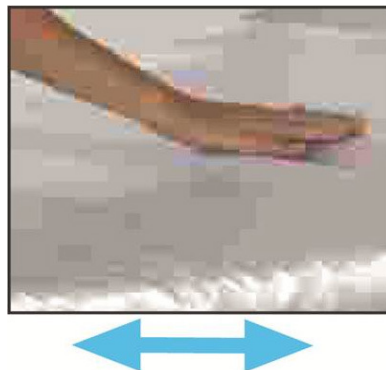

Visuaalinen tarkistus:

Tarkista, että materiaali ja saumat ovat ehjät.
Varmista, ettei materiaali ole kulunut tai valkaistu.



Mekaaninen kuorma tai paino:

Tarkista kahvojen kunto ja varmista, etteivät kahvojen saumat ole kuluneet.



Turvallisuuden toteaminen:

Taivuta vuodesuojaa varovasti ja varmista, että tuote on edelleen elastinen, mutta tuntuu silti tasaiselta ja tukevalta.



Kitkan tarkistus:

Varmista, että vuodesuojan pinta on karkea ja tarjoaa hyvän tartuntapinnan siirtoalustoille. Vertaa tarvittaessa uuteen tuotteeseen.

**KAHVAT HELPOTTAVAT HENKILÖN LIIKKUTTEUA JA SIIRTELYÄ.
KAHVAT EIVÄT OLE TARKOITETTU HENKILÖN NOSTOON.**

VARMISTA TUOTTEEN MOITTEETON KUNTO!

Vuodesuoja kuluu käytössä. Tarkista tuote säännöllisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön. Poista vahingoittunut tuote käytöstä.